

ZAKŁADANIE soczewek



- 2.** Umieść soczewkę na palcu wskazującym i doceń, jaka jest cienka.



- 1.** Umyj ręce mydłem, spłucz dokładnie wodą i upewnij się, że ręce zostały całkowicie osuszone niepyłącym się ręcznikiem.



- 4.** Powoli zbliż soczewkę do oka.



- 3.** Sprawdź, czy soczewka ma kształt miski. Jeśli jej krawędzie wywijają się na zewnątrz, oznacza to, że jest wywrócona na lewą stronę.



- 6.** Ostrożnie połóż soczewkę na oku.



- 5.** Użyj środkowego palca jednej ręki, aby podnieść górną powiekę, a środkowego palca drugiej ręki, aby ściągnąć dolną powiekę w dół.



- 8.** Im więcej razy to zrobisz, tym będzie to dla Ciebie bardziej naturalne. Powtórz to samo dla drugiego oka.




- 7.** Mrugnij kilka razy, aby pomóc ułożyć się soczewce na swoim miejscu.

ZDEJMOWANIE soczewek



- 1.** Umyj ręce mydłem, spłucz dokładnie wodą i upewnij się, że ręce zostały całkowicie osuszone niepyłącym się ręcznikiem.

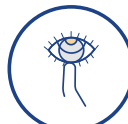

- 2.** Unieś górną powiekę, a dolną ściągnij środkowym palcem.



- 3.** Użyj palca wskazującego, aby przesunąć soczewkę w dół, na białą część oka.



- 4.** Chwyć soczewkę dwoma palcami i wyjmij ją z oka. To samo powtórz dla drugiego oka.



- 5.** Ściągając soczewki, należy pamiętać o środowisku i wyrzucać je do kosza, a nie do zlewu.



Program Lojalnościowy Zakontaktowani

zobacz wyraźnie swoje korzyści!



Soczewki kontaktowe TOTAL30, TOTAL30 for Astigmatism, TOTAL30 MULTIFOCAL, PRECISION1, PRECISION1 for ASTIGMATISM, AIR OPTIX plus HydraGlyde, AIR OPTIX plus HydraGlyde for Astigmatism, AIR OPTIX plus HydraGlyde Multifocal, DAILIES TOTAL1, DAILIES TOTAL1 for Astigmatism, DAILIES TOTAL1 Multifocal, DAILIES AquaComfort Plus, DAILIES AquaComfort Plus Toric, DAILIES AquaComfort Plus Multifocal do korekcji wad wzroku u osób ze zdrowymi oczami.

Płyn OPTI-FREE PureMoist, AOSEPT PLUS z HydraGlyde do czyszczenia, dezynfekcji i przechowywania miękkich soczewek kontaktowych. Krople nawilżające do oczu Systane Hydration bez konserwantów.

Instrukcja używania: ifu.alcon.com

Podmiot prowadzący reklamę: Alcon Polska Sp. z o.o.

Producent: Alcon Laboratories, Inc.

Upoważniony przedstawiciel: Alcon Laboratories Belgium

PL-DT1-2400022